

手術器具・ハサミ・インプラント器具 etc.

メンテナンス用オイルスプレー

1. 潤滑効果が優れ、サビを防ぎます
2. 除菌・抗菌テストを立証
3. 安全性テストを立証
4. パラフィンオイルが基剤
5. 日本特許 PAT4873755

OZONOIL- α S
オゾノイル アルファ エス

オゾン (O_3) が溶解した
除菌・抗菌力を兼ね備えた
潤滑オイル



290ml
¥3,000 (税別)

オゾノイル α s (アルファエス) は

神戸医療産業都市の（財）先端医療振興財団クラスター推進センターの技術支援を受け、開発に成功したメンテナンス用オイルスプレーです。

除菌・抗菌テスト

枯草菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・肺炎球菌・カンジダ菌・ノロウイルスで効果を示す。

— 日本食品分析センター —

安全性テスト

経口毒性・口腔粘膜刺激性・眼刺激性・皮膚刺激性テストで安全性を示す。

— 日本食品分析センター —

用途

- ・ オートクレープ他で滅菌処理をする前・後に使用することで摩擦を軽減し、**擦過腐食を防ぎます。**
- ・ 潤滑性能を発揮します。
- ・ 器具のメンテナンスに使用することで**サビを防ぎます。**
- ・ **除菌・抗菌効果を示します。**
- ・ **安全安心なパラフィンオイルです。**

注意

- ・ 天然ゴムやラテックス製の製品に使わない。
- ・ 吸入・飲用不可
- ・ 誤って目に入った時は、よく洗い流して医師の診断を受けて下さい。
- ・ スプレー缶表示の注意事項を守ること。

使用方法

- ・ 使用前に缶をよく振り、噴射口を目標局部に当てて適量を噴霧する。
- ・ 噴射口のある上部を上にして、常温で保管する。
- ・ 電気製品に使用時は電源を切って使用する。
- ・ 使用期限を守って下さい。



オゾノイル α s オイルは
オートクレープでの滅菌に
影響を与えません

先行販売品

歯科用ハンドピース
メンテナンス用オイルスプレー



480ml
¥4,500 (税別)

販売元 **株式会社 E テック**

本社 〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2
TEL 078-795-1217 FAX 078-795-1227

URL: <http://www.e-teck.co.jp/>

オゾノイル

検索

■HP(<http://www.e-teck.co.jp/>)の使用方法的の動画もご覧ください。

お問い合わせ先: