



## デンティストア シールド専用 紫外線殺菌灯交換説明書



※殺菌灯交換後は、同梱のシールに交換日を記入の上本体に貼り付けて、次の交換の目安として下さい。

※殺菌灯交換後、開閉操作を行い、殺菌灯が正常に点灯・消灯することを確認して下さい。  
動作しない場合は、コネクタがロックされていないことが考えられますので、もう一度、確認して下さい。  
それでも動作しない場合は、ご使用を止めて、ご購入頂きました代理店様、もしくは弊社までご連絡下さい。

※その他、製品に関するお問合せは、ご購入頂きました代理店様、もしくは弊社までご連絡下さい。

## 紫外線殺菌灯の交換方法

1. 本体カバーを開けた状態で、メインスイッチを切り、電源コードを取り外します。



注記：殺菌灯カートリッジ色は、銀色から白色に、順次、切り替わっております。性能、交換方法に違いはございませんので、同様にご使用頂けます。


2. 本体より内部受け皿を取り外します。(手前に引くことで、簡単に外れます。)



3. この後の作業がしやすいよう、写真のようにカバーが開いた面を上にして置きます。(下にタオル等を敷き、本体にキズがつかないようにご注意下さい)




4. 殺菌灯カートリッジ(銀色のプラスチック製)を固定しているビスを、プラスドライバーを使って外します。[2箇所]  
(取り外したビスは、再利用しますので、無くさないようにして下さい)

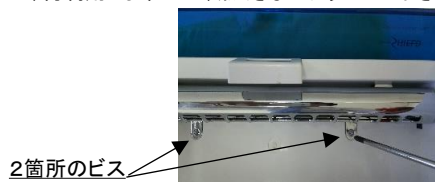

5. 殺菌灯カートリッジの網目部分の両端をつかんで、手前に少し引き出し、奥のコネクタ、及びコネクタのロックの位置を確認して下さい。



6. ロックをしっかりとつまんだ状態で、コネクタを上下にこねるようにしながら引き抜きます。

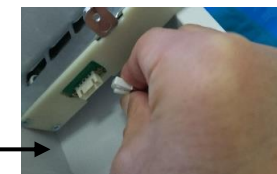

7. 新しい殺菌灯カートリッジのコネクタを、奥までしっかり差し込んで、ロックされていることを確認して下さい。



8. 新しい殺菌灯カートリッジの上部[2箇所]のツメを本体のスリットに差し込み、次にビス固定部[2箇所]をパチンとはめ込みます。




カートリッジのツメと  
本体のスリット



ビス固定部

9. 新しい殺菌灯カートリッジを、プラスドライバーを使ってビスで固定して下さい。[2箇所]

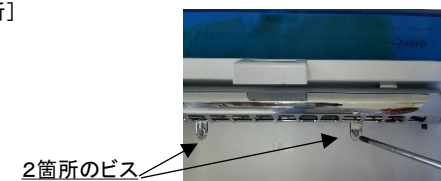

10. 内部受け皿を奥までしっかり入れて下さい。次に電源コードを差し込んで、メインスイッチを入れ、センサーにより本体カバーを閉じて下さい。



×

○



**E・テック 株式会社 E・テック**

Tel: 078-335-5425 / Fax: 078-335-5426

URL: <http://www.e-teck.co.jp/>